

Oxivir Plus

Mitmeotstarbeline puhastus- ja desinfitseerimisvahend mitteinvasiivsetele meditsiinitarvikutele ja seadmetele

Kirjeldus

Diversey Oxivir Plus on kontsentreeritud desinfitseeriv puhastusvahend mitteinvasiivsetele meditsiinitarvikutele ja -seadmetele

Peamised omadused

- Patenteeritud Hydrogen Peroxide (kiirendatud vesinikperoksiidi) happeline koostis
- Bakteritsiidne, virutsiidne, fungitsiidne, pärmseenevastane ja spooridevastane
- Lühike kontaktaeg
- Efektiivne puhastaja
- Lõhnava

Eelised

- Puhastab ning desinfitseerib üheaegselt, tänu millele lüheneb tööaeg
- Põhjalikult testitud järgides Euroopa norme. Toode on väga tõhus desinfitkant ning suudab kahjutuks teha: HIV, HBV, HCV, Avian Influenza, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, MRSA, VRE ja Norovirus
- Suurepäraseid puhastusomadused, kaasa arvatud katlakivi eemaldus
- Toode on ohutu kasutajale, puuduvad respiratoorsed ärritajad
- Keskkonnasõbralik toode. Laguneb veeks ja õhuks
- Sobib kasutamiseks ka kõrge ohuga piirkondades tervishoius, kaasaarvatud OR, ICU, NICU ja palatites.
- MITTE KASUTADA invasiivsetel meditsiiniriistadel ja seadmetel

Kasutusjuhend

Doseerimine:

3.5% saavutamaks desinfitseerivaid omadusi. (35ml 1L vee kohta)

Kasutamine ühe sammuna:

Pritspuhastamine ja desinfitseerimine:

1. Eemaldada lahtine mustus
2. Pritsida lapile või vajadusel pinnale
3. Pühkida pind puhta lapiga

Lahuse valmistamine ämbrisse, pesu ning desinfitseerimine:

1. Eemaldada lahtine mustus
2. Kanda lahus mopi või lapiga pinnale ning jätta toimima
3. Lasta toimida kuni on saavutatud soovitud toime
4. Valmistada uus lahus kui senine on muutunud määrdunuks

Tähelepanek: Desinfitseerides Norovirus't, tuleb eelpuhastada pind enne desinfitseerimist. Lasta ainel toimida pinnal 2 minutit enne ära pühkimist.

Oluline:

Lahuse valmistamisel mitte kasutada sooja vett. Mitte segada teiste toodetega. Mitte kasutada happetundlikel pindadel.

CE
0088



Oxivir Plus

Mitmeotstarbeline puhastus- ja desinfitseerimisvahend
mitteinvasiivsetele meditsiinitarvikutele ja seadmetele

Tehnilised näitajad

Välimus:	Selge kollane vedelik
Suhteline tihedus [20° C]:	1.029
pH-tase valmislahusel:	1.8 +/- 0.5 3.5% lahusel
pH-tase konts.:	0.5

Ülaltoodud informatsioon on tüüpiline tavatootmisele ning seda ei tuleks võtta kui spetsifikatsiooni.

Ohutu käsitlemine ning säilitamine

Täielik informatsioon toote käsitlemiseks ning utiliseerimiseks on ära toodud ohutuskaardil. Säilitada originaalpakendis. Vältida äärmuslikke temperatuure. Reageerib oksüdeerivate ühenditega.

Toote sobivus

Kasutades ettenähtud eesmärkidel ja etteantud tingimustel sobib Diversey Oxivir Plus enamike üldkasutatavatele pindadele ning materjalidele.

Keskkonna-alane teave

Tootes kasutatavad pindaktiivsed ained on ülimalt biolagunevad vastavalt EL Puhastusvahendite Regulatsioonile EC 648/2004.

Mikrobioloogiline info:

Tõhusus on tõestatud vastavuses direktiividega: EN1276, EN13697, EN1650, EN14776, EN13624 ja EN13727.

Saadaolevad pakendid

Tootekood	Pakendi suurus	Pakendi tüüp
7519560	Oxivir Plus 2x5L	5L kanister
7519562	Oxivir Plus 2x5L	5L kanister

